

Triacid-N

Απολυμαντικό και καθαριστικό για εργαλεία και εξοπλισμό

Συμπυκνωμένο υγρό χωρίς αλδεϋδες για τον καθαρισμό και την απολύμανση με βυθισμό χειρουργικών εργαλείων και εξοπλισμού εργαστηρίου από καουτσούκ, μέταλλο, πορσελάνη, κεραμικά, αναισθησιολογικού εξοπλισμού, άκαμπτων ενδοσκοπίων, κτλ.

Επίσης κατάλληλο για χρήση σε πλυντήρια υπερήχων.

Ενεργά συστατικά ανά 100 γρ: 18,0 γρ. N – Δωδεκυλοπροπανο

-1,3 - διαμίνη. **Άλλα συστατικά:** Ισοτριδεκανόλη αιθοξυλιωμένη, γαλακτικό οξύ. **Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό 648/2004/ΕΚ:**

τουλάχιστον 5 % αλλά κάτω του 15 % μη ιονικά τασιενεργά, N - Δωδεκυλοπροπανο -1,3 - διαμίνη, Άρωμα, Limonene. **Χρήση:** Διάλυση συμπυκνωμένου υγρού σε νερό σύμφωνα με τον δοσομετρικό πίνακα. Βυθίστε τα ανοικτά εργαλεία πλήρως στο διάλυμα για τον προτεινόμενο χρόνο επαφής. Ξεπλύνετε με νερό καλής μικροβιολογικής ποιότητας και κατόπιν στεγνώστε τα εργαλεία.

Φάσμα δράσης: Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, σποροκτόνο, δραστικό σε ιούς με περίβλημα (HBV, HCV, HIV) (καταχωρημένο στη λίστα απολυμαντικών VAH).

Δοσολογία:

Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο,	30 ml/l	(3%)	5 λεπτά
μυκοβακτηριοκτόνο - Καθαρές συνθήκες	10 ml/l	(1%)	15 λεπτά
(σύμφωνα με DGHM)	5 ml/l	(0.5%)	30 λεπτά
	2.5 ml/l	(0.25%)	60 λεπτά
Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο,	10 ml/l	(1%)	15 λεπτά
μυκοβακτηριοκτόνο - Ρυπαρές συνθήκες	5 ml/l	(0.5%)	30 λεπτά
(σύμφωνα με DGHM)	2.5 ml/l	(0.25%)	60 λεπτά
Δραστικό σε ιούς με περίβλημα*	10 ml/l	(1%)	15 λεπτά
Σποροκτόνο – Καθαρές συνθήκες	75 ml/l	(7.5%)	15 λεπτά
(EN 14347)	50 ml/l	(5%)	60 λεπτά

* σύμφωνα με την σύσταση του RKI, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

KINΔYNOΣ. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας, ζεστές επιφάνειες, σπινθήρες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. Φοράτε προστατευτικά γάντια/συσκευή προστασίας ματιών/ρουχισμό με μακριά μανίκια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **Αποθήκευση:** Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από παιδιά. **Διάθεση:** Άδεια και κλειστά δοχεία μπορούν να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπολείμματα προϊόντος: Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210-7793777.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση μόνο. Διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών πριν τη χρήση.

LOT



Κάτοχος δικαιωμάτων - Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ξάνθου 10, Τ.Κ. 17778, Ταύρος Αττικής

Τηλ. Κέντρο: 210-4838224 / Fax: 210-4838547 / Email: direct@pcosmidis.gr

www.pcosmidis.gr

1000 ml
UN 2920

CE 0482

Παρασκευαστής / Συσκευαστής:

AFP Antiseptica Forschungs und Produktions GmbH, Γερμανία