

OPASTER'ANIOS

Απολυμαντικό
υψηλού επιπέδου



- Διάλυμα έτοιμο για χρήση
- Ευρέως φάσματος αντιμικροβιακό
- Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του λουτρού με ειδική ταινία
- Άοσμο
- Σταθερότητα του λουτρού διαβροχής: 14 ημέρες

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απολύμανση υψηλού επιπέδου ιατρικών συσκευών, χειρουργικού και ιατρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ενδοσκόπησης και εξοπλισμού ευαίσθητου στη θερμοκρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπλε διαυγές διάλυμα
- Δραστικό κατά του *Clostridium difficile*
- Διάλυμα ορθοφθαλδεΐδης 0,55% με pH 7
- Μεγάλη συμβατότητα με όλους τους τύπους υλικών
- Λήξη: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής
- Χρήση σε συνδυασμό με κάθε τύπο προϊόντος καθαρισμού για προ-απολύμανση




ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ



OPASTER'ANIOS

Απολυμαντικό υψηλού επιπέδου

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

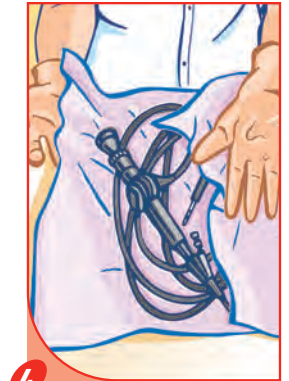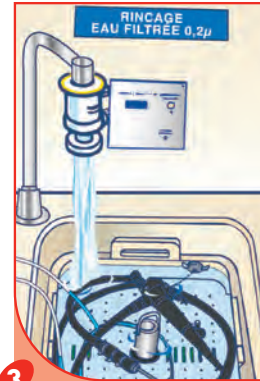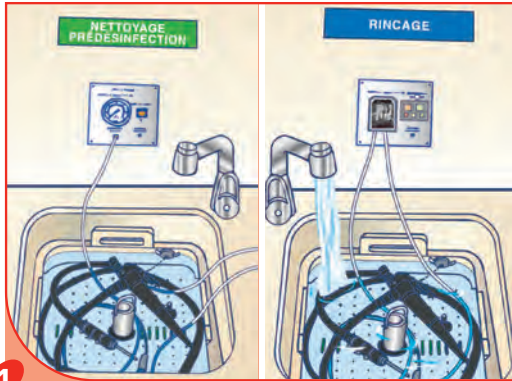

Στάδιο προ-απολύμανσης : Καθαρίστε την ιατρική συσκευή με ένα απορυπαντικό ή προαπολυμαντικό προϊόν όπως ANIOSYME XL3, ANIOS'CLEAN EXCEL D ή ANIOSYME DLT Plus. Ξεπλύνετε προσεκτικά. Για τον εξοπλισμό ενδοσκόπησης: καθαρισμός με μάκτρο και ενεργοποίηση ροής νερού.

Στάδιο απολύμανσης: ρίξτε το διάλυμα. Καλύψτε το δοχείο. **Χρόνος επαφής: 5 λεπτά.*** Μέγιστος χρόνος διατήρησης του λουτρού διαβροχής: 14 ημέρες.

Ξεπλύνετε προσεκτικά την ιατρική συσκευή με αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό (0,2μm) εξωτερικά και εσωτερικά.

Σκουπίστε με πετσέτα μίας χρήσης. Φυλάξτε την ιατρική συσκευή σε όσο το δυνατόν πιο άσπες συνθήκες μέχρι την επόμενη χρήση.

*Δραστικότητα κατά του Clostridium difficile σε 30 λεπτά

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ρυθμιστικό διάλυμα ορθο-φθαλαδεΐδης (0.55%), χρωστική ουσία, άρωμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Επικίνδυνο - τηρείτε τις προφυλάξεις χρήσης (Έχουν οριστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και την σήμανση των χημικών προϊόντων). Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +35°C. Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIb (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

- 1 4 μπιτόνια των 5L Κωδ. 2504.028
2 Ταινίες ελέγχου (κουτί των 50) Κωδ. 100.110

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό κατά	Πρότυπα	Χρόνος επαφής
Βακτήρια	EN 1040, EN 13727+A1, EN 14561	5 λεπτά
Μυκοβακτήρια	EN 14348, EN 14563	5 λεπτά
Ζυμομήκυτες / Μούχλα	EN 1275, EN 13624, EN 14562	5 λεπτά
Ιοί	EN 14476	5 λεπτά
	PRV (υποκατάστατο HBV), BVDV (υποκατάστατο HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus	5 λεπτά
Σπόρια βακτηρίων	Clostridium difficile O27 (EN 14347, EN 13704)	30 λεπτά

Όλες οι αντιμικροβιακές δράσεις του προϊόντος περιέχονται στον επιστημονικό φάκελο που είναι διαθέσιμος μετά από αίτημα.



GR2504-160202-Οι φωτογραφίες δεν είναι δεσμευτικές