

ΣΕΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ

ΚΟΛΠΙΚΗ ΓΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ

- ΑΣΑΦΩΝ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID)
- ή
- HPV-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
- ή
- ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΕ p16/Ki-67
- ή
- ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Πληροφορίες προϊόντος και μέγεθος συσκευασίας

Κολπική γέλη που προάγει την αυτόματη ύφεση και υποχώρηση ασαφών τραχηλικών επιχρισμάτων (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID) ή HPV-σχετιζόμενων τραχηλικών βλαβών ή τραχηλικών βλαβών θετικών σε p16/Ki-67 ή τραχηλικών διαβρώσεων. Διατίθεται ως κολπική γέλη 150 ml, συσκευασμένη με 2 επαναχρησιμοποιούμενους εφαρμοστήρες (ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ).

Τι είναι το DeflaGyn®;

Το DeflaGyn® είναι μία κολπική γέλη που περιέχει διοξείδιο του πυριτίου. Το DeflaGyn®

- δεσμεύει παθογόνους παράγοντες
- αναστέλλει την εξάπλωση παθογόνων παραγόντων
- προάγει την αντιοξειδωτική προστασία

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν;

Το DeflaGyn® πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ασαφών τραχηλικών επιχρισμάτων (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID) ή HPV-σχετιζόμενων τραχηλικών βλαβών ή τραχηλικών βλαβών θετικών σε p16/Ki-67 ή τραχηλικών διαβρώσεων.

Πώς χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν;

1. Τοποθετήστε τη φιάλη DeflaGyn® σε επίπεδη επιφάνεια. Ξεβιδώστε το πώμα της φιάλης. Πίστετε το άκρο του εφαρμοστήρα στο άνοιγμα της φιάλης.


2. Γυρίστε ανάποδα (180°) τη φιάλη DeflaGyn® με τον τοποθετημένο εφαρμοστήρα. Συλλέξτε 5 ml από τη γέλη τραβώντας αργά το έμβολο του εφαρμοστήρα μέχρι να φτάσει το σημάδι των 5 ml. Τραβήξτε τον γεμισμένο εφαρμοστήρα από τη φιάλη και τοποθετήστε τη φιάλη πίσω στην επιφάνεια.

3. Ξαπλώστε ανάσκελα, με ένα μαξιλάρι κάτω από τη λεκάνη σας. Εισάγετε τον εφαρμοστήρα βαθιά στον κόλπο (μέχρι να φτάσει στον τράχηλο). Ενδεχομένως να σας φανεί πιο εύκολο αν το κάνετε με λυγισμένα γόνατα. Μόλις τοποθετήσετε τον εφαρμοστήρα στη σωστή θέση, πιέστε αργά το έμβολο για να εναποθέσετε τη γέλη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον εφαρμοστήρα από τον κόλπο. Εφαρμόστε την κολπική γέλη κατά προτίμηση το βράδυ.

4. Παραμείνετε σε οριζόντια θέση για περίπου 1 λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι η λεκάνη σας είναι ακόμα ανασκηωμένη. Αυτό θα διασφαλίσει τη σωστή κατανομή της κολπικής γέλης στον τράχηλο.

5. Καθαρίστε καλά τον εφαρμοστήρα μετά τη χρήση. Ξεχωρίστε τον σωλήνα και το έμβολο του εφαρμοστήρα. Πλύνετε στο χέρι και τα δύο μέρη με ζεστό νερό (έως 50°C). Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων. Στεγνώστε τα μέρη του εφαρμοστήρα και τοποθετήστε τα πάλι μαζί. Ο εφαρμοστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 28 φορές, όταν καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

6. Απόρριψη χρησιμοποιημένου εφαρμοστήρα: Ο χρησιμοποιημένος και καθαρισμένος εφαρμοστήρας μπορεί να απορριφθεί μαζί με την ανακύκλωση πλαστικού, αν είναι δυνατόν, ή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

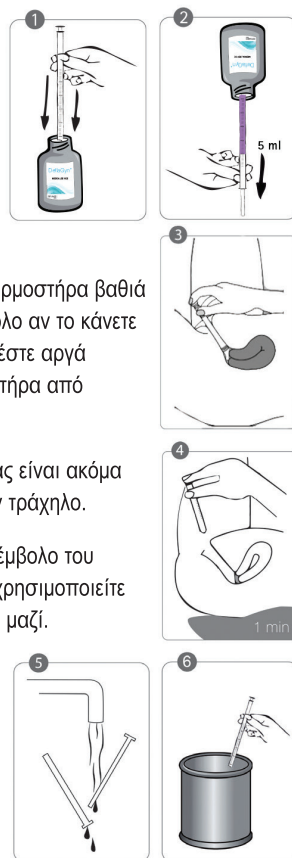

Πόσο καιρό πρέπει να χρησιμοποιήσω το DeflaGyn®;

Ασθενείς χωρίς έμμηνο ρύση

Το DeflaGyn® πρέπει να χρησιμοποιείται για διάρκεια 28 ημερών x 3. Μετά από 28 ημέρες θεραπείας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την ενδοκολπική γέλη DeflaGyn® για 3 ημέρες. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη θεραπεία για άλλες 28 ημέρες και σταματήστε για άλλες 3 ημέρες. Συνεχίστε με τον τρίτο κύκλο θεραπείας.

Ασθενείς με έμμηνο ρύση

Μην χρησιμοποιείτε την ενδοκολπική γέλη DeflaGyn® κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρύσης (περίπου 3-5 ημέρες/κύκλος). Δεν είναι απαραίτητο να διακόψετε τη θεραπεία για άλλες 3 ημέρες, καθώς η έμμηνο ρύση υπολογίζεται ως διακοπή της θεραπείας. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ενδοκολπική γέλη DeflaGyn® οποιαδήποτε ημέρα του κύκλου σας.

Αντενδείξεις:

Μην χρησιμοποιείτε την ενδοκολπική γέλη DeflaGyn® σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά αυτού του προϊόντος. Η ταυτόχρονη χρήση κολπικής γέλης DeflaGyn® και προϊόντων που παραμένουν στον κόλπο (π.χ. κολπικοί δακτύλιοι) θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των προϊόντων και επομένως αντενδείκνυται. Μην χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστήρα σε περίπτωση που δεν έχει καθαριστεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά. Χρησιμοποιήστε τον εφαρμοστήρα μόνο για την κολπική γέλη DeflaGyn®.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Κάψιμο και κνησμός σε σπάνιες περιπτώσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν:

Ανακινήστε το μπουκάλι πριν από τη χρήση! Μετά την εφαρμογή, είναι πιθανό να διαρρεύσει ποσότητα από την παρεχόμενη γέλη. Η γέλη μπορεί να εμφανίζεται ελαφρώς κοκκινωπή και να αποχρωματίσει τα εσώρουκά σας. Ωστόσο, ο αποχρωματισμός θα εξαφανιστεί μετά το πλύσιμο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σερβιέτα.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Σύνθεση	Ανά εφαρμογή
Υψηλής διασποράς διοξειδίου του πυριτίου	10,0 mg
Κιτρικό οξύ	24,8 mg
Σεληνιώδες νάτριο	0,83 mg
Ισοδύναμο σεληνίου	0,25 mg

Συμπληρωματικοί παράγοντες: υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, νερό.

Συνηρητικά: σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο.

Ειδικές προειδοποιήσεις:

Η κολπική γέλη DeflaGyn® πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά από ιατρική συμβουλή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι ενδοκολπικές θεραπείες (θεραπευτικές ή/και καθαρισμού και/ή αντισύλληψης) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το νωρίτερο δύο ώρες μετά την εφαρμογή της κολπικής γέλης DeflaGyn®. Η σεξουαλική επαφή επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή όταν χρησιμοποιείτε κολπική γέλη DeflaGyn®. Ο ελαφρώς κοκκινωπός αποχρωματισμός στο πώμα δεν επηρεάζει τη χρήση του προϊόντος.

Ημερομηνία έκδοσης φυλλαδίου: 08-2021

Κατασκευαστής:

DEFLAMED INTERNATIONAL s.r.o.

Heřmanova 597/61

170 00 Praha 7

Τσεχία

Διανομή:




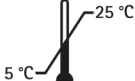
Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε.

Τατοίου 97Α & Μάνης, 14451 Μεταμόρφωση, Αττική

Τηλ.: +30 2105787113-4, Fax: +30 2105787148

www.virtuspharma.care

Σύμβολα στην εξωτερική συσκευασία και στην ετικέτα:

			
Αριθμός παρτίδας	Ανάληψη έως	Οδηγίες χρήσης	Όρια θερμοκρασίας φύλαξης

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του DeflaGyn® Κολπική Γέλη και Εφαρμοστήρας.

DeflaGyn®

CE 1014



ΚΟΛΠΙΚΗ ΓΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ

- ΑΣΑΦΩΝ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID)
- ή
- HPV-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
- ή
- ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΕ p16/Ki-67
- ή
- ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Πληροφορίες προϊόντος και μέγεθος συσκευασίας

Κολπική γέλη που προάγει την αυτόματη ύφεση και υποχώρηση ασαφών τραχηλικών επιχρισμάτων (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID) ή HPV-σχετιζόμενων τραχηλικών βλαβών ή τραχηλικών βλαβών θετικών σε p16/Ki-67 ή τραχηλικών διαβρώσεων. Διατίθεται ως κολπική γέλη 150 ml.

Τι είναι το DeflaGyn®;

Το DeflaGyn® είναι μία κολπική γέλη που περιέχει διοξειδίο του πυριτίου. Το DeflaGyn®

- δεσμεύει παθογόνους παράγοντες
- αναστέλλει την εξάπλωση παθογόνων παραγόντων
- προάγει την αντιοξειδωτική προστασία

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν;

Το DeflaGyn® πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση ασαφών τραχηλικών επιχρισμάτων (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID) ή HPV-σχετιζόμενων τραχηλικών βλαβών ή τραχηλικών βλαβών θετικών σε p16/Ki-67 ή τραχηλικών διαβρώσεων.

Πώς χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν;

Ανατρέξτε στην Περίληψη των Οδηγιών Χρήσης.

Συλλέξτε 5 ml από τη γέλη τραβώντας αργά το έμβολο του εφαρμοστήρα μέχρι να φτάσει το σημάδι των 5 ml και εφαρμόστε τη γέλη στον κόλπο (μέχρι να φτάσει στον τράχηλο). Κατά προτίμηση πραγματοποιήστε την εφαρμογή το βράδυ πριν πάτε για ύπνο.

Πόσο καιρό πρέπει να χρησιμοποιήσω το DeflaGyn®;

Ασθενείς χωρίς έμμηνο ρύση

Το DeflaGyn® πρέπει να χρησιμοποιείται για διάρκεια 28 ημερών x 3. Μετά από 28 ημέρες θεραπείας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την ενδοκολπική γέλη DeflaGyn® για 3 ημέρες. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη θεραπεία για άλλες 28 ημέρες και σταματήστε για άλλες 3 ημέρες. Συνεχίστε με τον τρίτο κύκλο θεραπείας.

Ασθενείς με έμμηνο ρύση

Μην χρησιμοποιείτε την ενδοκολπική γέλη DeflaGyn® κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρύσης (περίπου 3-5 ημέρες/κύκλος). Δεν είναι απαραίτητο να διακόψετε τη θεραπεία για άλλες 3 ημέρες, καθώς η έμμηνο ρύση υπολογίζεται ως διακοπή της θεραπείας. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ενδοκολπική γέλη DeflaGyn® οποιαδήποτε ημέρα του κύκλου σας.

Αντενδείξεις:

Μην χρησιμοποιείτε την ενδοκολπική γέλη DeflaGyn® σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά αυτού του προϊόντος. Η ταυτόχρονη χρήση κολπικής γέλης DeflaGyn® και προϊόντων που παραμένουν στον κόλπο (π.χ. κολπικοί δακτύλιοι) θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των προϊόντων και επομένως αντενδείκνυται.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Κάψιμο και κνησμός σε σπάνιες περιπτώσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν:
Ανακινήστε το μπουκάλι πριν από τη χρήση! Μετά την εφαρμογή, είναι πιθανό να διαρρεύσει ποσότητα από την παρεχόμενη γέλη. Η γέλη μπορεί να εμφανίζεται ελαφρώς κοκκινωπή και να αποχρωματίσει τα εσώρουχά σας. Ωστόσο, ο αποχρωματισμός θα εξαφανιστεί μετά το πλύσιμο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σερβιέτα.

Συνθήκες φύλαξης:
Μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Σύνθεση	Ανά εφαρμογή
Υψηλής διασποράς διοξειδίου του πυριτίου	10,0 mg
Κιτρικό οξύ	24,8 mg
Σεληνιώδες νάτριο	0,83 mg
Ισοδύναμο σεληνίου	0,25 mg

Συμπληρωματικοί παράγοντες: υδροξυαιθυλοκυταρίνη, νερό.
Συντηρητικά: σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο.




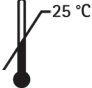
Ειδικές προειδοποιήσεις:
Η κολπική γέλη DeflaGyn® πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά από ιατρική συμβουλή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι ενδοκολπικές θεραπείες (θεραπευτικές ή /και καθαρισμού και /ή αντισύλληψης) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το νωρίτερο δύο ώρες μετά την εφαρμογή της κολπικής γέλης DeflaGyn®. Η σεξουαλική επαφή επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή όταν χρησιμοποιείτε κολπική γέλη DeflaGyn®. Ο ελαφρύς κοκκινωπός αποχρωματισμός στο πώμα δεν επηρεάζει τη χρήση του προϊόντος.

Ημερομηνία έκδοσης φυλλαδίου: 08-2021

Κατασκευαστής:
DEFLAMED INTERNATIONAL s.r.o.
Heřmanova 597/61
170 00 Praha 7
Τσεχία

Διανομή:
Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε.
Τατοΐου 97Α & Μάνης, 14451 Μεταμόρφωση, Αττική
Τηλ.: +30 2105787113-4, Fax: +30 2105787148
www.virtuspharma.care

Σύμβολα στην ετικέτα:

			
Αριθμός παρτίδας	Ανάλωση έως	Οδηγίες χρήσης	Μέγιστο όριο θερμοκρασίας φύλαξης

DeflaGyn®

CE 0459

for Life
irtus
pharma

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ DEFLAGYN® ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Πληροφορίες προϊόντος και μέγεθος συσκευασίας

Εφαρμοστήρες για τη δοσομέτρηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος και τη χορήγηση στον ασθενή.






2 εφαρμοστήρες πολλαπλής χρήσης συσκευασμένοι σε σακούλες PE.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω τον εφαρμοστήρα;

Χρησιμοποιήστε τον εφαρμοστήρα σε συνδυασμό με τη DeflaGyn® Κολπική Γέλη για να διασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή και δοσολογία της γέλης.

Πώς χρησιμοποιώ τον εφαρμοστήρα;

1. Τοποθετήστε τη φιάλη DeflaGyn® σε επίπεδη επιφάνεια. Ξεβιδώστε το πώμα της φιάλης. Πιέστε το άκρο του εφαρμοστήρα στο άνοιγμα της φιάλης.
2. Γυρίστε ανάποδα (180°) τη φιάλη DeflaGyn® με τον τοποθετημένο εφαρμοστήρα. Συλλέξτε 5 ml από τη γέλη τραβώντας αργά το έμβολο του εφαρμοστήρα μέχρι να φτάσει το σημάδι των 5 ml. Τραβήξτε τον γεμισμένο εφαρμοστήρα από τη φιάλη και τοποθετήστε τη φιάλη πίσω στην επιφάνεια.
3. Ξαπλώστε ανάσκελα, με ένα μαξιλάρι κάτω από τη λεκάνη σας. Εισάγετε τον εφαρμοστήρα βαθιά στον κόλπο (μέχρι να φτάσει στον τράχηλο). Ενδεχομένως να σας φανεί πιο εύκολο αν το κάνετε με λυγισμένα γόνατα. Μόλις τοποθετήσετε τον εφαρμοστήρα στη σωστή θέση, πιέστε αργά το έμβολο για να εναποθέσετε τη γέλη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον εφαρμοστήρα από τον κόλπο. Εφαρμόστε την κολπική γέλη κατά προτίμηση το βράδυ.
4. Παραμείνετε σε οριζόντια θέση για περίπου 1 λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι η λεκάνη σας είναι ακόμα ανασηκωμένη. Αυτό θα διασφαλίσει τη σωστή κατανομή της κολπικής γέλης στον τράχηλο.
5. Καθαρίστε καλά τον εφαρμοστήρα μετά τη χρήση. Ξεχωρίστε τον σωλήνα και το έμβολο του εφαρμοστήρα. Πλύνετε στο χέρι και τα δύο μέρη με ζεστό νερό (έως 50°C). Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων. Στεγνώστε τα μέρη του εφαρμοστήρα και τοποθετήστε τα πάλι μαζί. Ο εφαρμοστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 28 φορές, όταν καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.
6. Απόρριψη χρησιμοποιημένου εφαρμοστήρα: Ο χρησιμοποιημένος και καθαρισμένος εφαρμοστήρας μπορεί να απορριφθεί μαζί με την ανακύκλωση πλαστικού, αν είναι δυνατόν, ή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

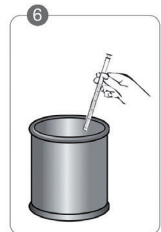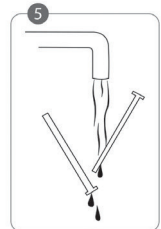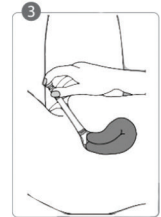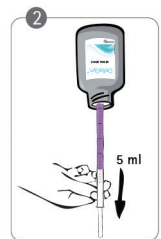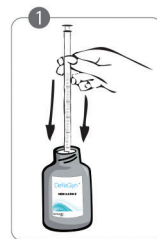

Ακολουθήστε την Περίληψη των Οδηγιών Χρήσης.

Αντενδείξεις:

Μην χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστήρα σε περίπτωση που δεν έχει καθαριστεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά. Χρησιμοποιήστε τον εφαρμοστήρα μόνο για την κολπική γέλη DeflaGyn®.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Συνθήκες φύλαξης:

Μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Ημερομηνία έκδοσης φυλλαδίου: 08-2021

Κατασκευαστής:

Union Plastic - ZA Robert BP 27

43140 Saint-Didier-en-Velay

Γαλλία

Διανομή:

Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε.

Τατοΐου 97Α & Μάνης, 14451 Μεταμόρφωση, Αττική

Τηλ.: +30 2105787113-4, Fax: +30 2105787148

www.virtuspharma.care